



長期減毛用ダイオードレーザー メディオスター『モノリス』

MEDIOSTAR®



(ダブル)
3つのWで患者様に合わせた
幅広い施術方法が選択可能に

1

ダブルモード

ショット式(熱破壊)
& 連射式(蓄熱) 選択可



ショット式
(熱破壊)




連射式
(蓄熱)


2

ダブル波長

2波長ブレンド照射で
幅広い毛質に対応

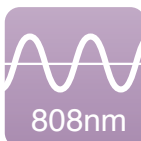

808nm

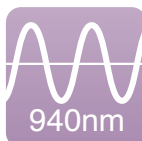

940nm

3

ダブルハンドピース

2本同時接続可
スクエアスポット &
トップハットビーム



2本接続



スクエア
スポット



大口径スポット

最大 **9.98cm²**

MADE IN GERMANY

承認番号 30200BZX00404000


Asclepion
Laser Technologies

ダブルモード

ショット式(熱破壊)と連射式(蓄熱) 2つのモードが使えます

患者さまの肌質、希望に合わせて
モード選択が可能

モノリスは高出力レーザー光による
ショット式(熱破壊)と、徐々に熱を加えて
温度を上昇させる低侵襲な連射式(蓄熱)
を選択することが可能。患者さまのご要望や
肌質、施術部位に合わせて柔軟に施術計画
がご提案できます。

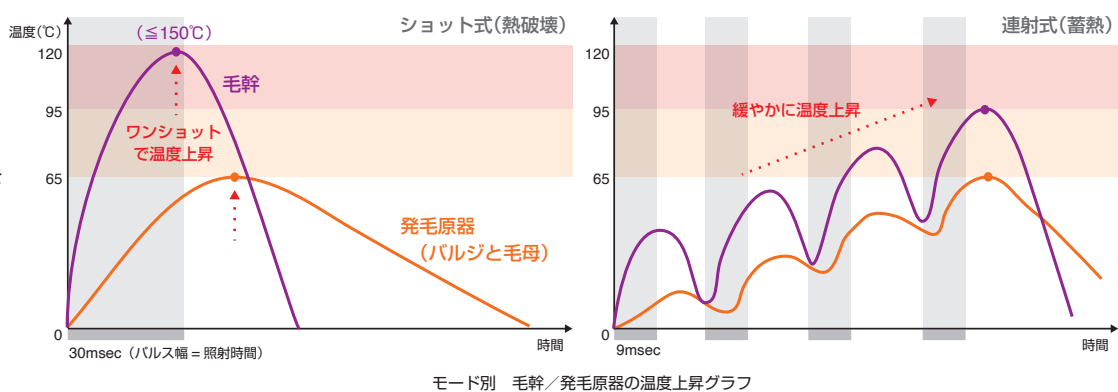


ダブル波長


深層まで作用する2波長ブレンド照射で幅広い毛質に対応できます

安全かつ効率的な照射を可能に

メラニン吸収性の高い808nmの波長に加えて、肌の深部へ到達する940nmの
波長を同時に照射します。幅広い毛質に対して効率的な施術を実施できます。

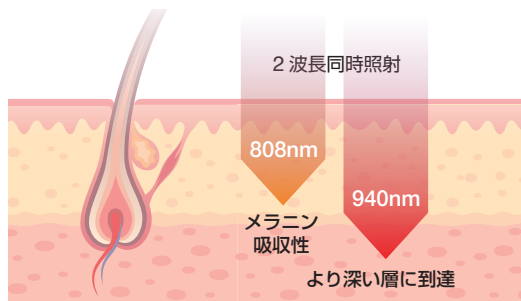

波長の違いによる作用のイメージ

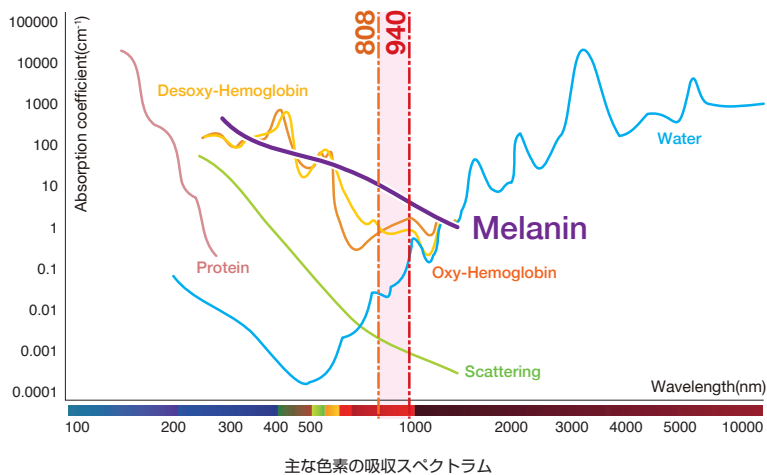

ダブルハンドピース


スクエアスポット & トップハットビームで、打ちモレ/打ちムラの少ない施術を実現

安全でスピーディーかつ効率的な照射を可能に


スクエアスポットにより、ホットスポットをつくるオーバーラップ
が不要になり熱傷リスクを軽減。さらにトップハット照射によって、
スポット全体のフルエンスが均一化され、出力ムラが少なく照射部
位のダメージを抑えることが可能です。

大口径スポットも含めた3サイズから選択可能

レーザー光ロスが少なく、より深い層まで効率的に加熱できる大口
径(XL)スポットもラインナップ。ハンドピースを3つのスポット
サイズから選択可能です。本体にはハンドピース2本を同時に接続
できます。

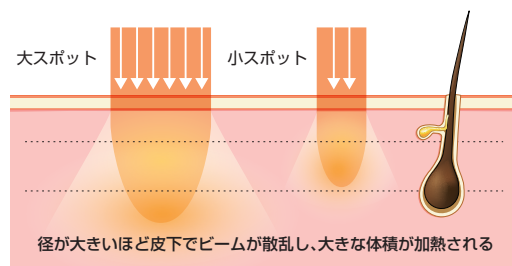

スポット径によるビーム到達深度の違い

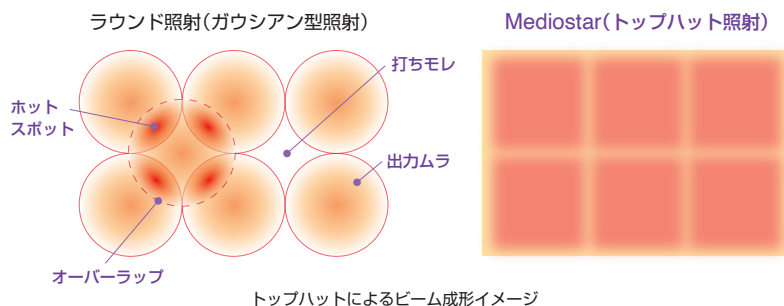

ハンドピース スポット3サイズ(実寸)

